

Medizid® Rapid

Unsere besonders schnell wirkende, gebrauchsfertige Sprühwischdesinfektion zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten

Präparatetyp

Medizid® Rapid ist ein gebrauchsfertiges, sehr schnell wirkendes Präparat zur Reinigung und Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal zur Schnelldesinfektion zwischen Behandlungen und Eingriffen, wenn sehr kurze Einwirkzeiten erforderlich sind.

Anwendungsbereiche

Für alle alkoholbeständigen Oberflächen und Gegenstände von Medizinprodukten im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, und Pflegebereichen.

Anwendung

Gebrauchsfertig. Gegenstände und Oberflächen mit Medizid® Rapid vollständig benetzen, antrocknen lassen und ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Trocknet schnell ab.

Haltbarkeit

Medizid® Rapid kann bis 12 Monate nach dem erstmaligen Öffnen der Originalgebinde verwendet werden. Die Mindesthaltbarkeit beträgt 3 Jahre (s. Etikettendruck). Vorausgesetzt wird, dass die Produkte ausschließlich in den gut verschlossenen Originalgebinden gelagert werden, dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass jede Kontamination während der Produktentnahme vermieden wird und dass die Lagerung und Aufbewahrung der Anbruchgebinde unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost) im Bereich von 5 - 25 °C erfolgt.

Einwirkzeit:

Wirksamkeiten	vollständig benetzt
Nach VAH / DGHM:	
Bakterizid, levurozid	15 sec.
Tuberkulozid (inkl. M.-terrae)	30 sec.
MRSA/ mykobakterizid	1 min.
Begrenzt viruzid (nach DVV):	
BVDV/ Vaccinia (inkl. HBV, HCV, HIV)	30 sec.
Viruswirksamkeiten:	
Rota	30 sec.
Noroviren	3 min.
Polio / Adeno	15 min.
Polyoma / SV 40	1 min.



Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:
 30 g 1-Propanol, 15 g 2-Propanol
 10 g Ethanol, 0,05 g Didecylmethylammoniumpropionat,
 0,02 g Alkylaminguanidindiacetat
 Weitere Bestandteile:
 Duftstoffe, Nichtionische Tenside.

Präparateigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Aldehydfrei
- Schnell und umfassend wirksam in bereits 15 sec.
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), mykobakterizid (inkl. M.-avium)
- Wirksam gegen alle behüllten Viren: BVDV / Vaccinia (inkl. HCV, HBV / HIV)
- Wirksam gegen alle unbehüllten Viren: Rota, Adeno, Polyoma / SV40, Polio und Noroviren
- MRSA-wirksam
- Rückstandsfrei
- Angenehmer Geruch
- Gute Materialverträglichkeit, auch bei empfindlichen Materialien
- Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie Acrylglas!
- Geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und der RKI-Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren
- VAH-gelistet
- IHO-gelistet

REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
01002D	250 ml	12 Flaschen	11169624
00975D	500 ml	18 Flaschen	10014658
00976D	1 l	12 Flaschen	00068794
00977D	5 l	2 Kanister	11169647

Zubehör

Kanisterhahn

Kanisterschlüssel

Sprühkopf für 1-l-Flasche